



Q-interactive

Kapitel 1

Vorbereiten der iPads für Q-interactive

Q-interactive Nutzerhandbuch

März 2017

Konfigurieren der iPad®-Einstellungen für Q-interactive

Bevor Sie Testungen mit Q-interactive durchführen können, müssen Sie die folgenden drei Schritte abschließen:

- Konfigurieren der Einstellungen auf beiden iPads, sodass:
 - a) Sie sich richtig miteinander verbinden, um Stimuli zu teilen und voneinander Daten zu empfangen;
 - b) Sie Stimuli in standardisierter Weise wiedergeben;
 - c) Ablenkungen, die zur Unterbrechung der Testsitzung führen könnten, vermieden werden.
- Installieren der Assess App aus dem Apple App Store oder iTunes.
- Bluetooth aktivieren.

Die in diesem Nutzerhandbuch dargestellten Hinweise und Informationen lehnen sich an die Einrichtung mit einem iPad Pro (Modell A 1673) mit iOS 10.3.2 an. Es soll jedoch allgemein darauf hingewiesen werden, dass empfohlen wird, alle potentiell die Testung störende Faktoren oder Funktionen, unabhängig von iPad-Modell oder Betriebssystem, auszuschalten. Wenn Sie mit dem iPad vertraut sein sollten, können Sie es mithilfe der Q-interactive Konfigurations-Checkliste für iPads schnell einrichten; die Checkliste finden Sie am Ende dieses Kapitels.


Das Nutzerhandbuch bietet eine Übersicht aller Q-interactive Funktionen. Gegebenenfalls sind in manchen Tests nicht alle Funktionen verfügbar.

Installation der Q-interactive App Assess


Assess ist eine App, die Sie aus dem Apple App Store oder dem iTunes Store auf Ihrem iPad oder über iTunes auf Ihrem Computer herunterladen. Um iTunes auf Ihrem Computer zu installieren, gehen Sie zu apple.com/itunes und folgen Sie den Anweisungen.

Der Download der App kann entweder am Computer oder am iPad erfolgen, die folgenden Hinweise zeigen jedoch explizit, wie die Assess App über den App Store auf dem iPad heruntergeladen wird. Sie müssen die Q-interactive App Assess auf beiden iPads installieren.

Schritt 1: Gehen Sie im App Store oben rechts auf die Suchleiste und geben Sie „q-interactive“ ein. Die Q-interactive App Assess wird Ihnen in den Vorschlägen angezeigt.

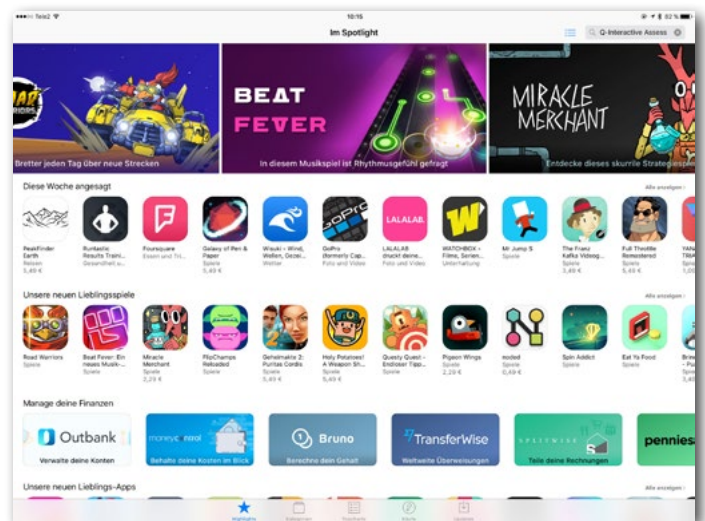

Schritt 2: Tippen Sie auf LADEN und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen zur Apple-ID an, um die App herunterzuladen.

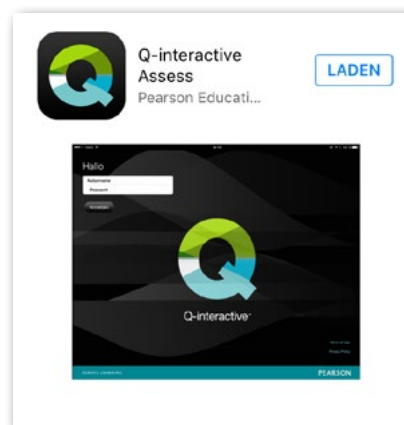

Hinweis für iCloud-Nutzer: Aus Gründen der Datensicherheit speichert Q-interactive Daten in einer Datei, die bewusst von der iCloud ausgeschlossen ist. Testdaten werden weder in der iCloud zugelassen noch wird eine Synchronisation mit den Apple Servern zugelassen.

Anpassen Ihrer iPad-Einstellungen für Q-interactive

Die Anpassung einiger Standardeinstellungen des iPads vor der Nutzung von Q-interactive trägt dazu bei, dass Stimuli während der Testung konsistent dargeboten werden und Störungen während der Testung vermieden werden. Alle diese Einstellungen lassen sich in der App „Einstellungen“ vornehmen.



WLAN aktivieren. Wenn Sie eine gesicherte WLAN-Verbindung haben, kann Q-interactive mit dem Internet verbunden bleiben und wird Ihre Daten während der Testung auf Q-interactive Central speichern.

Schritt 1: Tippen Sie auf „WLAN“ im Menü auf der linken Bildschirmseite.


Schritt 2: Tippen Sie auf den WLAN-Schalter auf der rechten Bildschirmseite, bis er von weiß zu grün umschaltet und das WLAN und Netzwerkoptionen angezeigt werden. Tippen Sie auf ein Netzwerk. Es wird ein Häkchen erscheinen, sobald die Verbindung vorhanden ist.




Bluetooth aktivieren. Bluetooth ermöglicht es den iPads, miteinander zu kommunizieren.

Schritt 1: Tippen Sie „Bluetooth“ im Menü auf der linken Bildschirmseite an.

Schritt 2: Tippen Sie den Bluetooth-Schalter auf der rechten Bildschirmseite, bis er von weiß zu grün umschaltet.

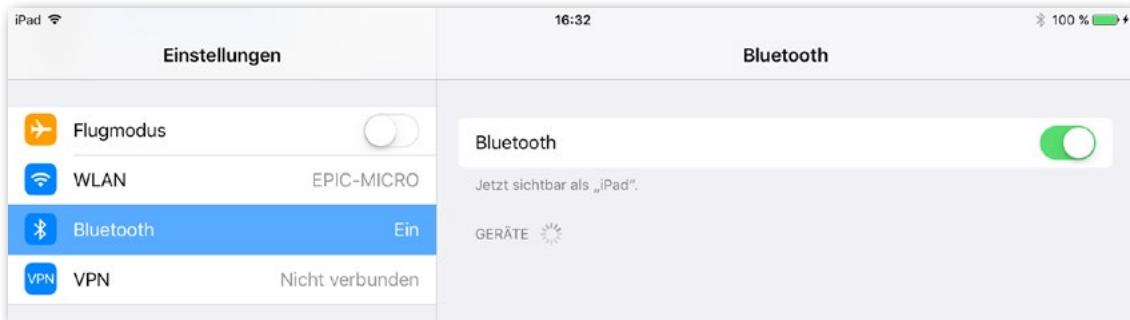


Gesten deaktivieren. Gesten sollten auf dem Testpersonen-iPad deaktiviert sein, um zu verhindern, dass die Testperson die Testsitzung verlässt. Um Gesten zu deaktivieren, tippen Sie „Allgemein“ im Menü auf der linken Bildschirmseite, tippen Sie dann auf der rechten Bildschirmseite auf „Multitasking“ und tippen Sie dann zuletzt bei „Gesten“ auf den Schalter auf der rechten Bildschirmseite, bis er auf weiß umschaltet.

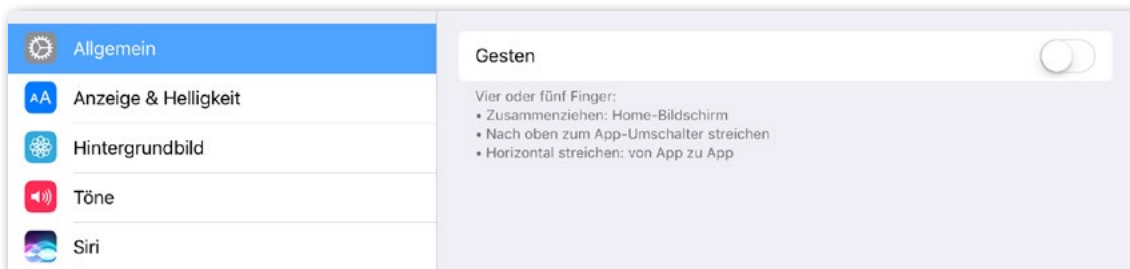


Auto-Korrektur und Auto-Großschreibung. Bei den Anmeldeinformationen für Q-interactive ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Indem Sie diese zwei Einstellungen ändern, erleichtert dies die korrekte Eingabe der Anmeldeinformationen und beugt einer verbreiteten Schwierigkeit im Anmeldeprozess vor.

Schritt 1: Tippen Sie „Allgemein“ im Menü auf der linken Bildschirmseite und wählen Sie dann „Tastatur“ auf der rechten Bildschirmseite aus.

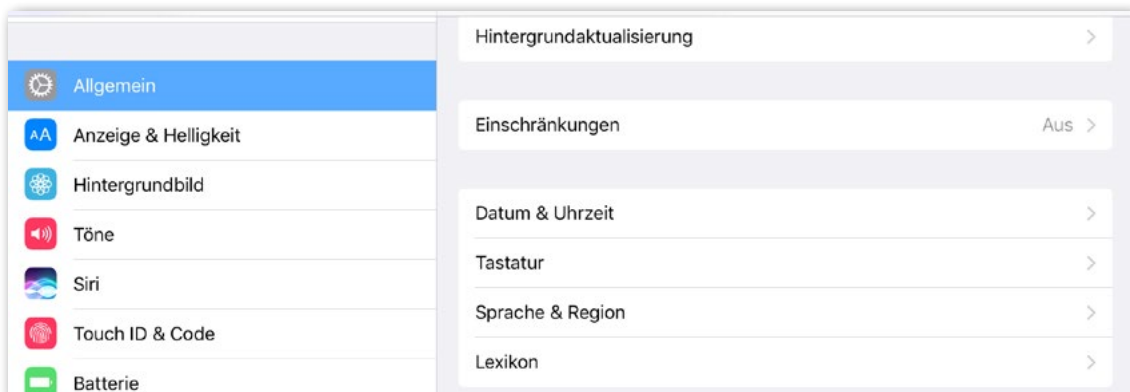


Schritt 2: Deaktivieren Sie die Optionen Auto-Korrektur und Auto-Großschreibung, indem Sie sie jeweils antippen, bis die Schalter auf weiß umschalten.

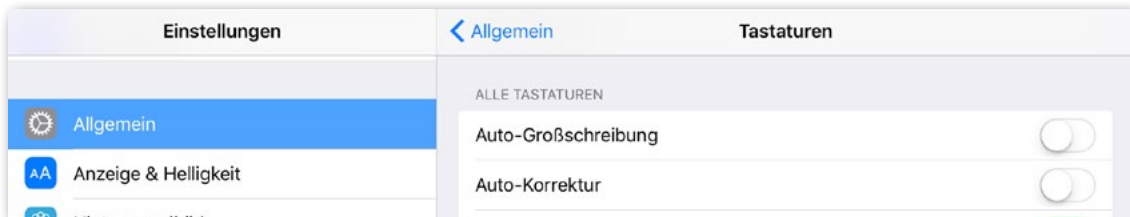

Das Format von Sprache & Region festlegen. Q-interactive verwendet die unter Sprache & Region auf dem iPad gespeicherten Einstellungen, um Texte, Datumsangaben und andere formatierte Werte in dem in Ihrem Land üblichen Format darzustellen.

Schritt 1: Tippen Sie auf der linken Bildschirmseite auf „Allgemein“. Scrollen Sie dann auf der rechten Bildschirmseite nach unten und tippen Sie auf „Sprache & Region“.

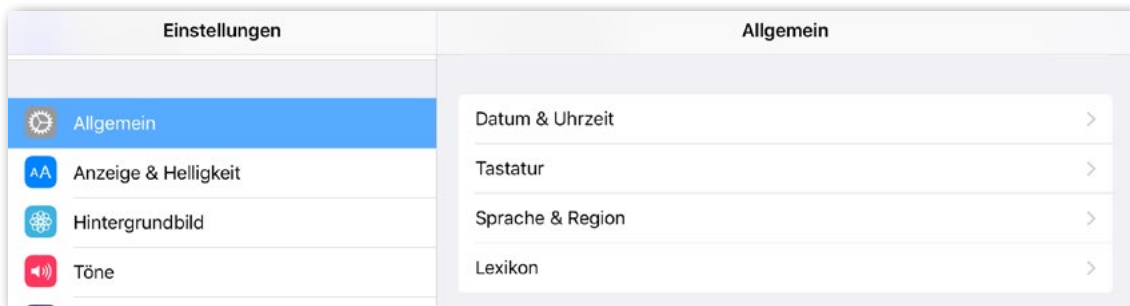

Schritt 2: Passen Sie „Sprache & Region“ nach Bedarf an.



Code einrichten. Die Einrichtung eines komplexen Codes trägt zu Sicherheit und Schutz des iPads bei. Neuere iPads verfügen außerdem über die Funktion der Touch ID, die zusätzliche Sicherheit bietet. Im Menü „Einstellungen“ können Sie einen Code unter „Touch ID & Code“ einrichten.


Anzeige & Helligkeit anpassen. Maximieren Sie die Helligkeit auf beiden iPads und setzen Sie die automatische Sperre auf 15 Minuten.

Schritt 1: Tippen Sie auf der linken Bildschirmseite auf Anzeige & Helligkeit.

Schritt 2: Maximieren Sie auf der rechten Bildschirmseite die Helligkeit, indem Sie den Kreis nach rechts ziehen, bis die gesamte Linie durchgehend blau ist.

Schritt 3: Deaktivieren Sie die Auto-Helligkeit. Auch die ggf. angezeigte Option „True Tone“ muss deaktiviert sein.


Schritt 4: Tippen Sie auf die Option „Automatische Sperre“ und setzen Sie diese auf 15 Minuten fest. Ein Häkchen erscheint bei der gewählten Option.

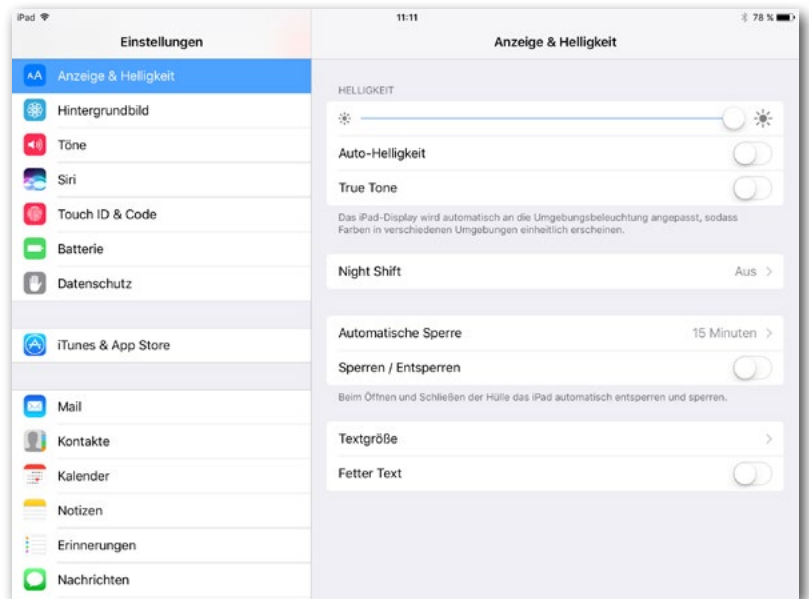

Anwendungsmodus ändern. Q-interactive benötigt zwei iPads, die je ihren spezifischen Zweck erfüllen. Ein iPad muss im Anwendungsmodus „Testleiter“ sein, das andere im Anwendungsmodus „Testperson“.

Schritt 1: Scrollen Sie im Menü auf der linken Bildschirmseite nach unten. Lokalisieren Sie dort Assess und tippen Sie darauf, um das Menü „Einstellungen“ von Assess zu öffnen.

Schritt 2: Tippen Sie auf der rechten Bildschirmseite auf „Anwendungsmodus“.

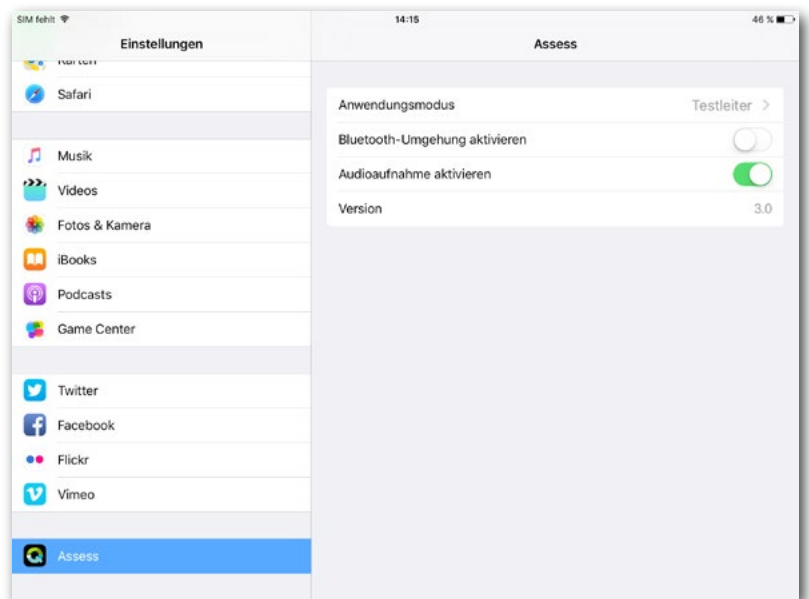

Schritt 3: Tippen Sie auf einem iPad auf „Testleiter“, bis ein Häkchen erscheint. Tippen Sie auf dem anderen iPad auf „Testperson“, bis ein Häkchen erscheint.




Hinweis für Nutzer von iPad Minis oder iPad Pros: Es **muss** ein iPad in Standardgröße (9.7 Zoll) als Testpersonen-Gerät verwendet werden. Sollten Sie einen iPad Mini oder einen iPad Pro (eine große Version) benutzen, muss dieses als Testleiter-Gerät verwendet werden.

Audioaufnahme deaktivieren. Für Untertests, bei denen eine mündliche Antwort erforderlich ist, kann Assess die Antworten aufnehmen, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt im Bewertungsprozess wiedergegeben und überprüft werden können. Jedoch ist es möglich, dass Sie keine Einverständniserklärung der Testperson für die Audioaufnahme erhalten. Beachten Sie bitte, dass, wenn Sie Kopfhörer mit Mikrofon anschließen, das iPad diese erkennt und zur Sprachaufnahme nutzt.

Schritt 1: Tippen Sie im Menü auf der linken Bildschirmhälfte auf „Assess“.

Schritt 2: Tippen Sie auf den Schalter „Mikrofon“ auf der rechten Bildschirmseite, bis er von grün zu weiß umschaltet.

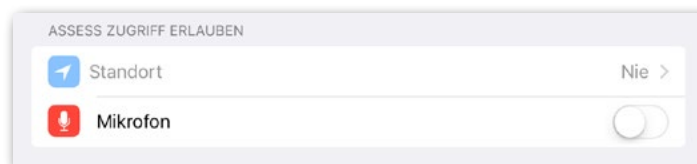


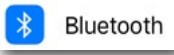

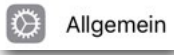

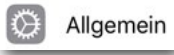








Hinweis: Diese Option ist erst sichtbar **nach** der Anmeldung in der App.

Tipps zur Leistung des iPads

- Wenn möglich sollten die Akkus vor dem Beginn der Testung vollständig geladen sein.
- Lassen Sie während der Testung auf dem iPad **keine** anderen Anwendungen ausführen und lassen Sie **keine** anderen Anwendungen geöffnet. Gehen Sie wie folgt vor, um Apps im Hintergrund zu schließen:
 1. Durch einen Doppelklick auf die Home-Taste werden alle aktuell geöffneten Apps angezeigt.
 2. Berühren Sie mit dem Finger die App, die Sie schließen möchten, und streichen Sie mit dem Finger zum oberen Bildschirmrand, um die App zu schließen.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, starten Sie die iPads nach jeder Testsitzung neu.

Q-interactive Konfigurations-Checkliste für iPads

Wenn Sie bereits im Umgang mit iPads vertraut sind, können Sie Ihr Gerät schnell mit Hilfe der folgenden Checkliste konfigurieren.

Testleiter-Gerät	Testpersonen-Gerät	Einstellungen	Menü	Auswahl
x	x	 WLAN		
x	x	 Bluetooth		
	x	 Allgemein	Gesten	
x	x	 Allgemein	Tastatur, Auto-Korrektur	
x	x	 Allgemein	Tastatur, Auto-Großschreibung	
x	x	 Anzeige & Helligkeit	(Balken nach rechts ziehen)	Maximum
x	x	 Anzeige & Helligkeit	Auto-Helligkeit	
x	x	 Anzeige & Helligkeit	Automatische Sperrung	15 Minuten
x		 Assess	Anwendungsmodus	Testleiter
	x	 Assess	Anwendungsmodus	Testperson